

.....

**PRÓTESIS HÍBRIDA INMEDIATA CON PILARES
MULTI-ESTÉTICOS**

.....

Dr. César Román Djoubi

A decorative graphic in the bottom-left corner consisting of overlapping curved shapes in light teal and light blue.

Fotografías Pre-operatorias




Intervención quirúrgica

Instalación de 4 implantes GMI modelo Phoenix de conexión externa de 4 x 17 mm entre mentonianos.



Pilares Multi-estéticos atornillados sobre los implantes recién instalados.

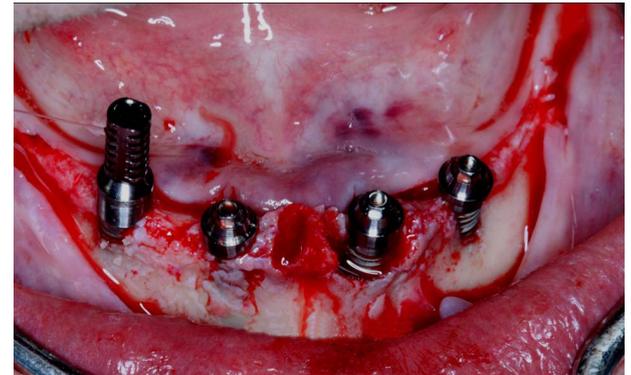



Atornillado de los cilindros provisionales sobre los pilares multi-estéticos.



Sutura.



Impresión con los cilindros para confección de la prótesis.

Las prótesis provisionarias se envían del laboratorio con perforaciones para su adaptación en boca.





Post-operatorio a las 72 h para recibir la prótesis provisoria.



Cilindros provisionales de titanio grado V atornillados a los pilares multi-estéticos.



Adaptación de la prótesis antes del rebasado.





Preparado para su rebasado con acrílico autocurado.



Se aíslan para la salida de los tornillos.



Recorte del exceso de los cilindros.



Ajuste de la oclusión.



Mimetización de los orificios metálicos con resina rosada.

