



Instrucciones para importar  
las librerías gmi  
en el software **exocad**

## Descargar el software

---

Desde el ordenador, conectarse a **[www.gmidental.com](http://www.gmidental.com)**

En el menú **PRODUCTOS**, ir al apartado Librerías **CAD/CAM > INTERFASE o DIRECTO A IMPLANTE** y seleccionar **Exocad**.

Clicar encima de **exocad**

Se descargará un archivo (*con el número actualizado de la revisión*) en la carpeta *Descargas* de su ordenador.

## Descomprimir el archivo

---

Vaya a la carpeta *Descargas* de su ordenador y descomprima el archivo.

Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como [7-zip](#).


Cuando descomprima el archivo le saldrán 2 carpetas:

- "*implant*" (contiene la librería de implantes GMI)
- "*modelcreator\_implants*" (contiene la librería de réplicas digitales GMI)


Mantenga abierta la carpeta *Descargas*.

## Localizar las carpetas de librerías en Exocad

Abra la ventana donde se encuentran sus librerías de Exocad. Para ello vaya buscándolas a través del navegador de archivos de su ordenador en la ruta indicada:

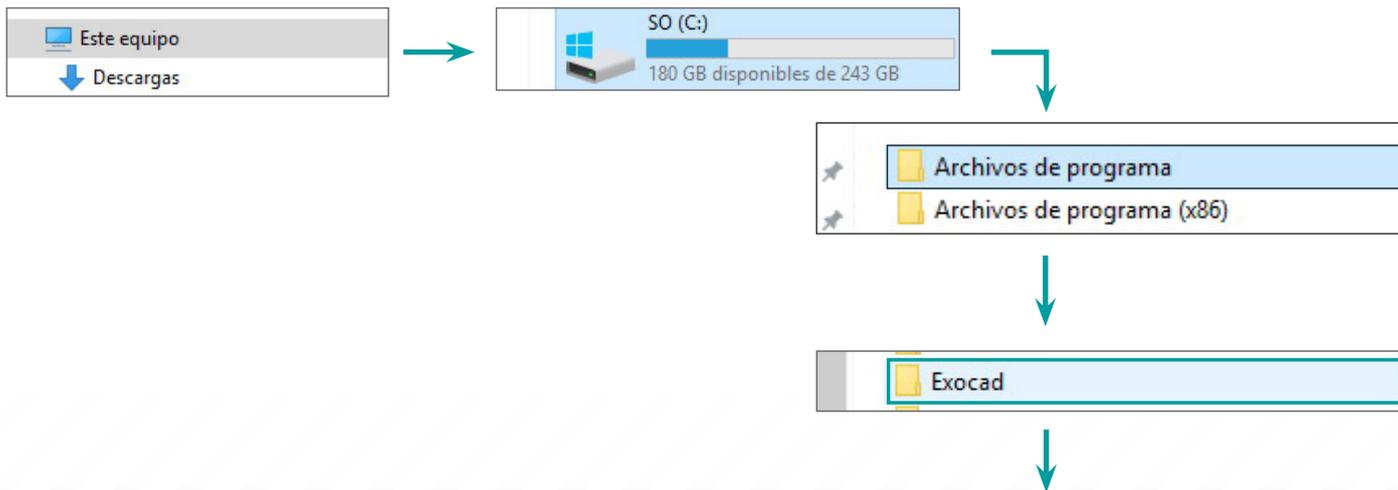


## Localizar las carpetas de librerías en Exocad

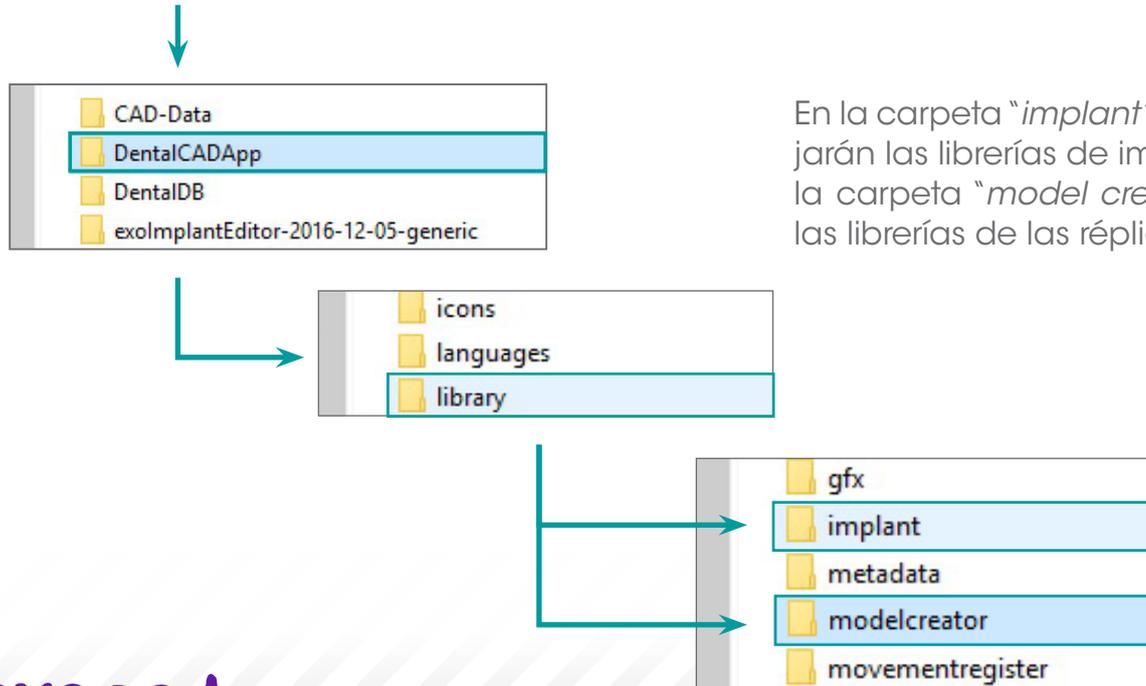

En la carpeta "*implant*" es donde se alojarán las librerías de implantes **gmi** y en la carpeta "*model creator*" se alojarán las librerías de las réplicas digitales **gmi**.

## Copiar las librerías GMI en las carpetas de librerías de Exocad

Ponga la carpeta *Descargas* (que contiene las carpetas de las librerías de gmi) al lado de las carpetas “*implant*” y “*modelcreator*” de Exocad.

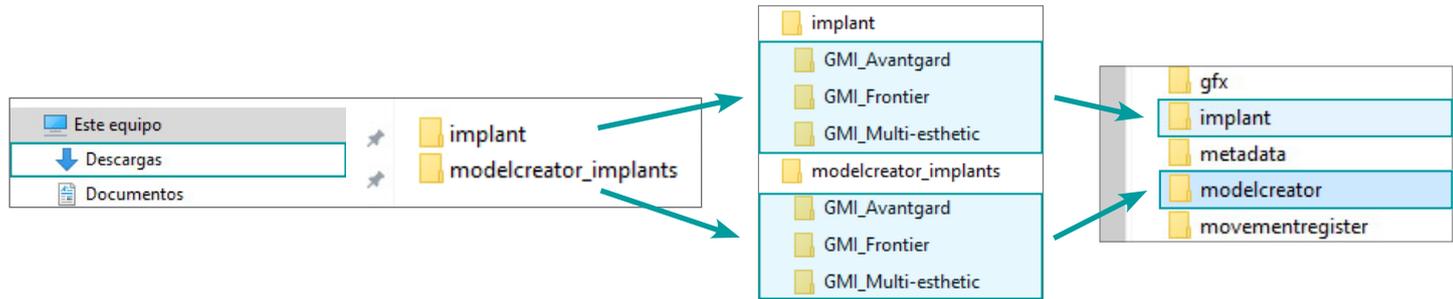

Seleccione el contenido de la carpeta “*implant*” o “*modelcreator\_implants*” y pulse el botón derecho del ratón. Elija “Copiar”.

Encima de la carpeta “*implant*” o “*modelcreator*” de Exocad y pulsando el botón derecho seleccione “Pegar”.

## Comprobación

---

Asegúrese que tiene las librerías correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad.

Entre en la carpeta "*implant*" o "*modelcreator*" y localice los archivos.

## Ejecutar Exocad

---

Ejecutar Exocad y elegir la interfase de **gmi**.

Gracias por su confianza

