



Instrucciones para importar
las librerías gmi
en el software **exocad**

Descargar el software

Desde el ordenador, conectarse a **www.gmidental.com**

En el menú **PRODUCTOS**, ir al apartado Librerías CAD/CAM > Interfase y seleccionar **Exocad**.

Clicar encima de **exocad**

Se descargará un archivo llamado **EXO_GMI_REVX.zip** (siendo X el número actualizado de la revisión) en la carpeta *Descargas* de su ordenador.

Descomprimir el archivo

Vaya a la carpeta **Descargas** de su ordenador y descomprima el archivo llamado **EXO_GMI_REVX.zip** (siendo X el número actualizado de la revisión).

Para descomprimir el archivo puede utilizar un descompresor estándar descargado de internet como [7-zip](#).


Cuando descomprima el archivo le saldrán 2 carpetas:

- "**implant**" (contiene la librería de implantes GMI)
- "**modelcreator_implants**" (contiene la librería de réplicas digitales GMI)


Mantenga abierta la carpeta **Descargas**.

Localizar las carpetas de librerías en Exocad

Abra la ventana donde se encuentran sus librerías de Exocad. Para ello vaya buscándolas a través del navegador de archivos de su ordenador en la ruta indicada:

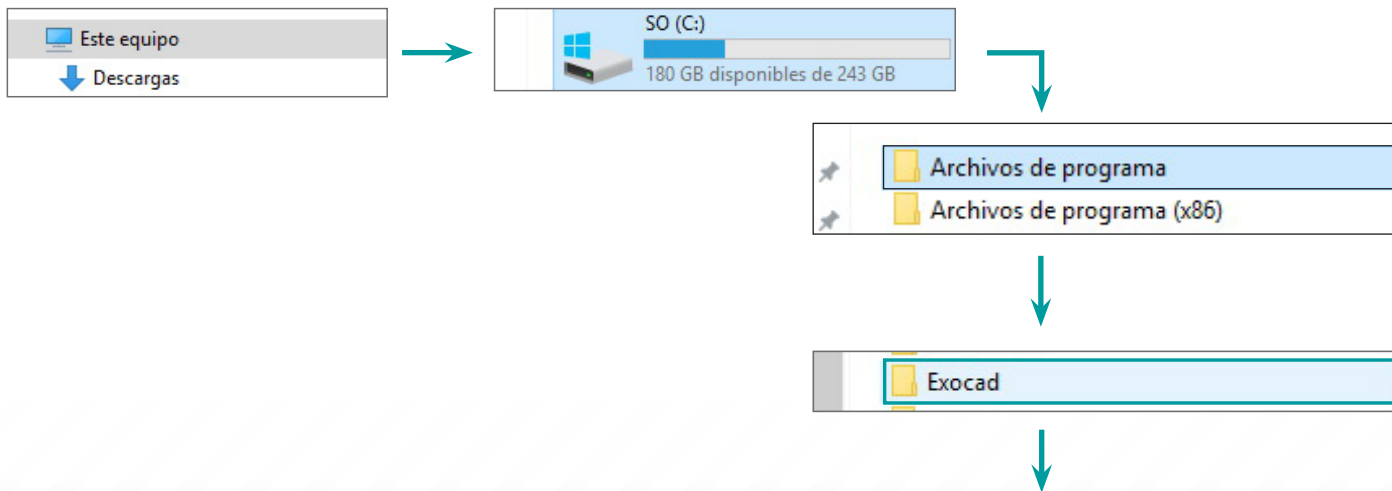


Localizar las carpetas de librerías en Exocad

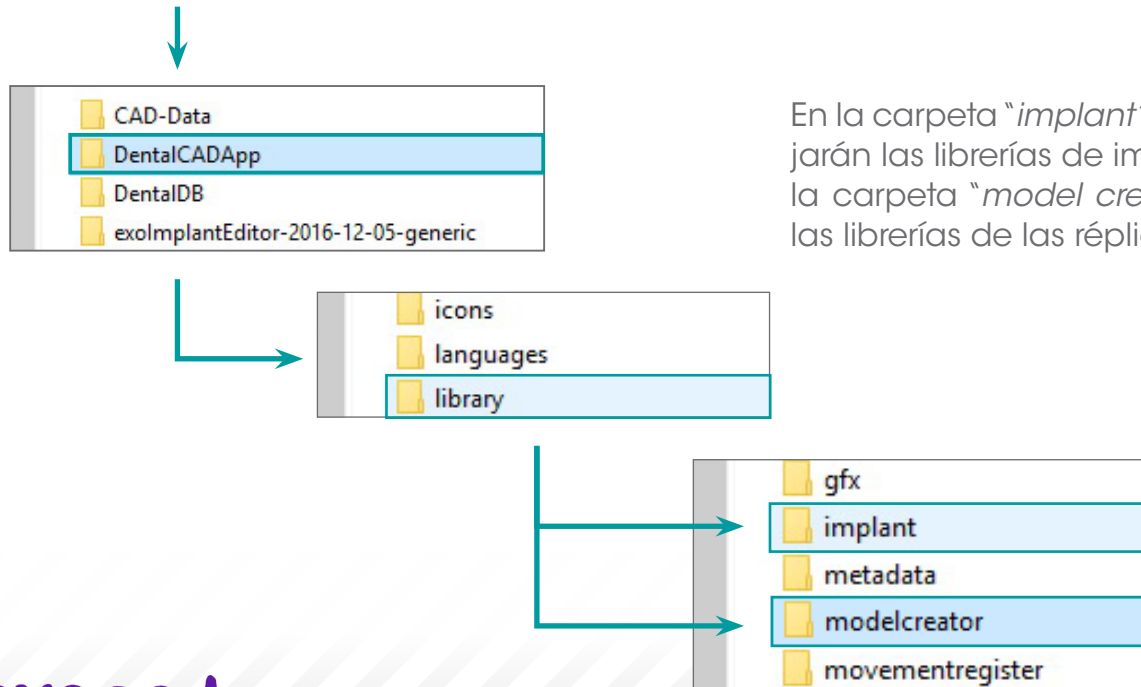

En la carpeta "*implant*" es donde se alojarán las librerías de implantes **gmi** y en la carpeta "*model creator*" se alojarán las librerías de las réplicas digitales **gmi**.

Copiar las librerías GMI en las carpetas de librerías de Exocad

Ponga la carpeta *Descargas* (que contiene las carpetas de las librerías de **gmi**) al lado de las carpetas *implant* y *modelcreator* de Exocad.

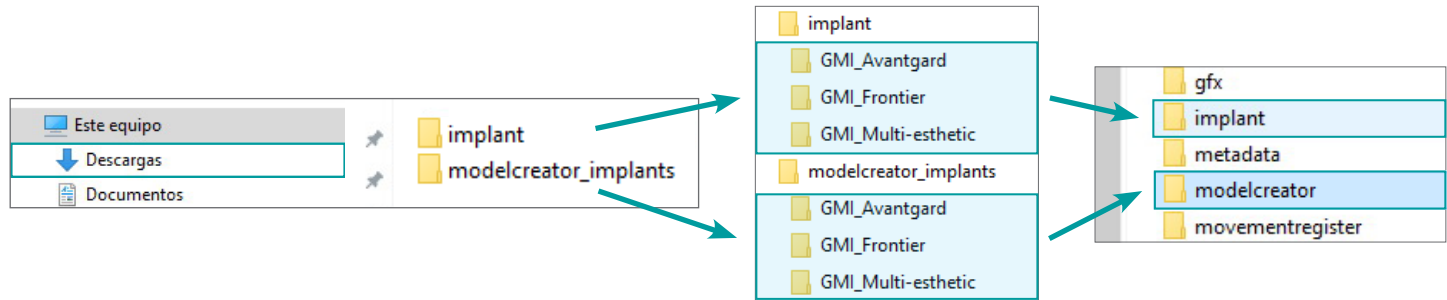

Seleccione el contenido de la carpeta *implant* o *modelcreator_implants* y pulse el botón derecho del ratón. Elija "Copiar".

Encima de la carpeta *implant* o *modelcreator* de Exocad y pulsando el botón derecho seleccione "Pegar".

Comprobación

Asegúrese que tiene las librerías correctamente copiadas en el menú de librerías de Exocad.

Entre en la carpeta "*implant*" o "*modelcreator*" y localice los archivos.

Ejecutar Exocad

Ejecutar Exocad y elegir la interfase de **gmi**.

Gracias por su confianza

