



3shape

Instructions to import  
gmi libraries  
into 3shape  software

## Download software

---

From the computer connect to **www.ilerimplant.com**

Go to **PRODUCTS** menu, open the **CAD/CAM Library** section and select **3Shape**.



Click on **3shape**  icon to start the download.

A file called **3S\_GMI\_REVX.zip** (*where X is the updated revision number*) will be downloaded into *downloads folder* of your computer.

# Import library

The library is imported using the *Control Panel* of 3shape.

Run it and choose "Import / Export".

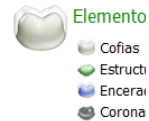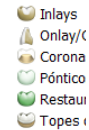

## Import library


Choose "Import materials".



## Import library


A window will appear to choose the file. Choose the library you have downloaded from the web in the *downloads* folder.

Choose “Open”.

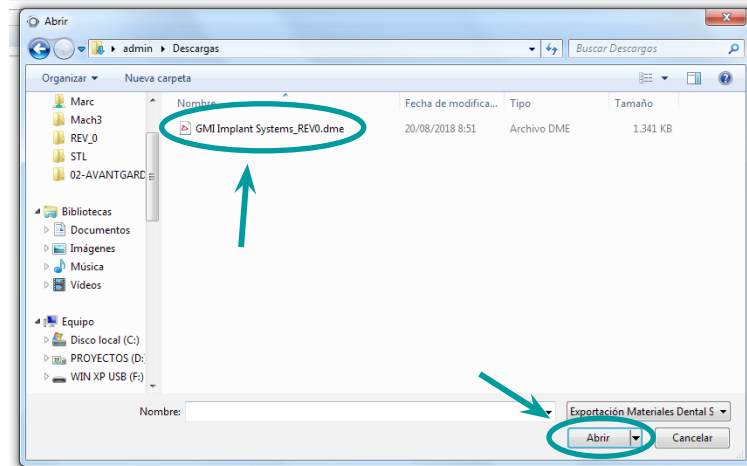

# Import library

Select "Import".

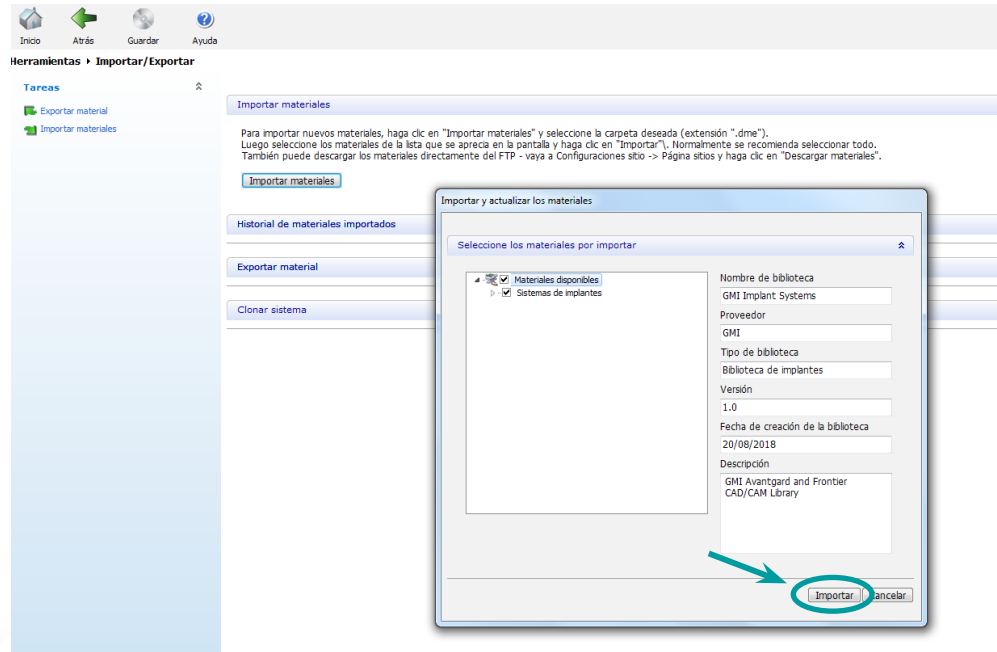

Inicio Atrás Guardar Ayuda

Herramientas ▶ Importar/Exportar

Tareas

- Exportar material
- Importar materiales

Importar materiales

Para importar nuevos materiales, haga clic en "Importar materiales" y seleccione la carpeta deseada (extensión ".dme"). Luego seleccione los materiales de la lista que se aprecia en la pantalla y haga clic en "Importar". Normalmente se recomienda seleccionar todo. También puede descargar los materiales directamente del FTP - vaya a Configuraciones sitio -> Página sitios y haga clic en "Descargar materiales".

Importar materiales

Historial de materiales importados

Exportar material

Clonar sistema

Importar y actualizar los materiales

Selección de los materiales por importar

- ✓ Materiales disponibles
  - ✓ Sistemas de implantes

Nombre de biblioteca: GMI Implant Systems

Proveedor: GMI

Tipo de biblioteca: Biblioteca de implantes

Versión: 1.0


Fecha de creación de la biblioteca: 20/08/2018

Descripción: GMI Avantgard and Frontier CAD/CAM Library

Importar Cancelar


# Import library

Confirm it has been imported correctly.

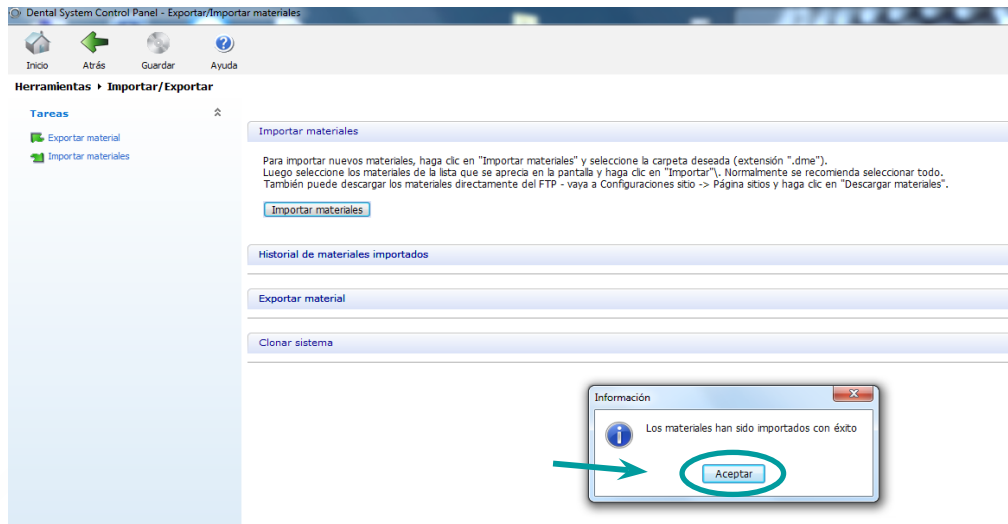

# Import library

Save, confirm and you can use the **gmi** libraries.

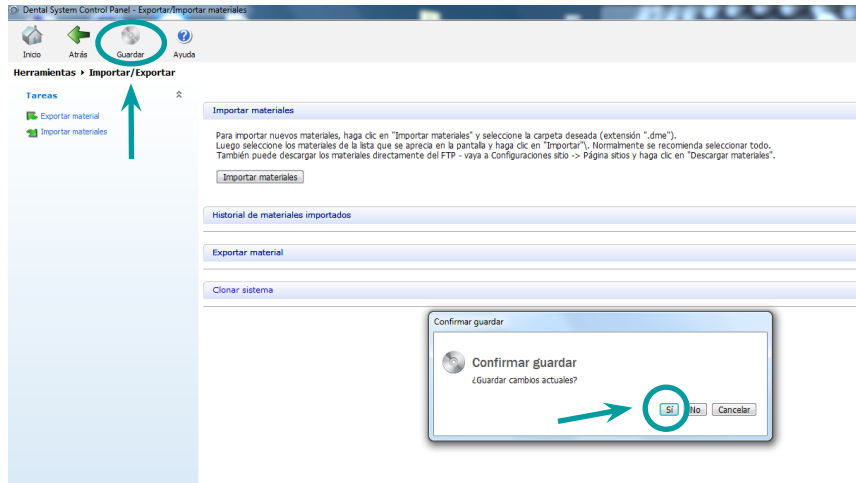



Thank you for trusting us

