



- Odontóloga y Máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Profesora asociada del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Miembro de las sociedades SECIB, SEPA, FOR, ITI y FICO.
- Revisora en Journal of Clinical and Experimental Dentistry.
- Autora de diversas publicaciones científicas.
- Premio SECIB 2016 al mejor artículo publicado en revistas de impacto extranjeras.



## REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA CON ICEBERG-OSS

*“Quiero ponerme los dientes que me faltan”*

### - Antecedentes:

- HFM
- Edad: 55 años
- Alergias: No refiere
- No antecedentes médicos
- No hábitos tóxicos

### - Diagnóstico:

- Edentulismo parcial





### - Plan de tratamiento:

- Regeneración ósea guiada en área de 16 y 17 con:

**Iceberg-oss®** 0,5gr y membrana de colágeno **Resodont F®** 32x25mm.

- Implantes osteointegrados **gmi avantgard®** en posición 14, 16 y 17, a los 6 meses de la regeneración.


- Prótesis sobre implantes en posición 14, 16 y 17.

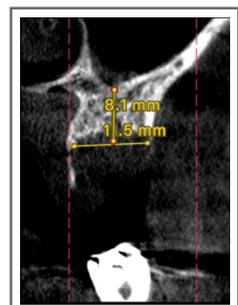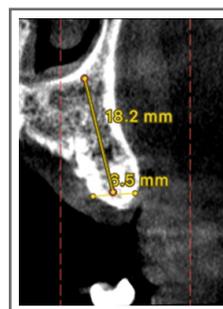

# REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA CON ICEBERG-OSS



Imagen preoperatoria

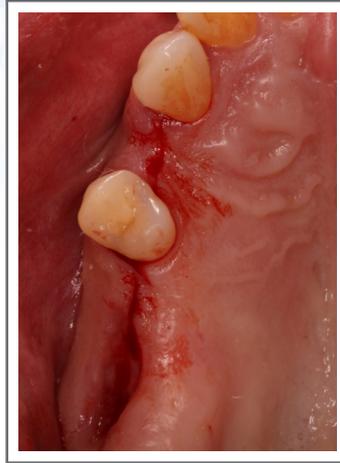


Incisión crestal con  
descarga mesial




Elevación del colgajo  
mucoperióstico




Iceberg-oss® 0,5gr partícula 0,2 - 1mm

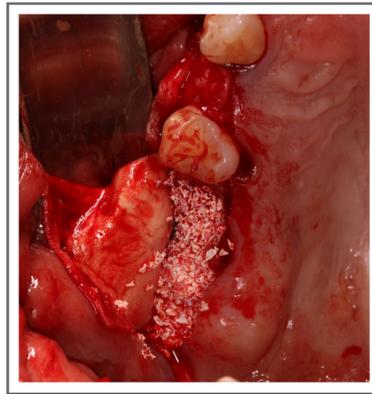


Colocación de membrana  
Resodent F® y relleno con Iceberg-Oss®

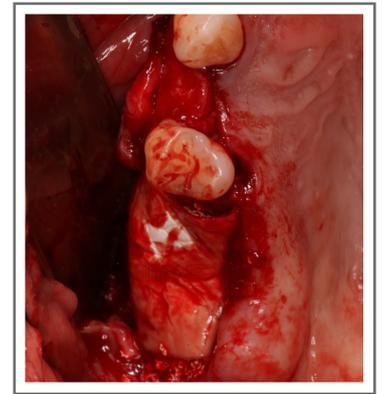

Adaptación de la membrana  
Resodent F®

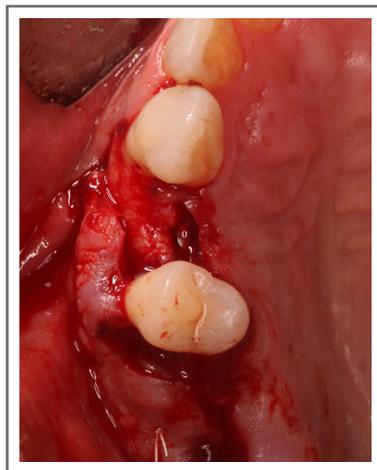

Colocación del implante  
**gmi avantgard®** (3,75 x 10mm)  
en posición 14

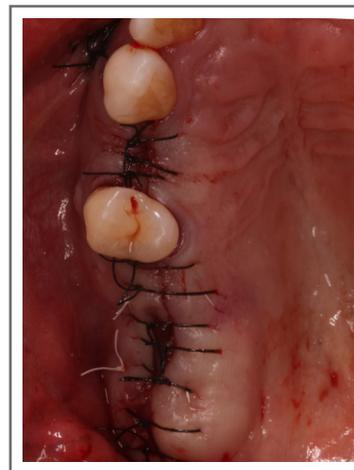

Sutura